

QUICKTIP

Musikprogram

Musikprogrammet har til formål at forbedre lyd kvaliteten for de brugere der lytter til musik

Det dedikerede musikprogram inkluderer:

- Et fittingrationale til musik, fokuseret på at forbedre hørbarheden i mere stille musik, og tydeligheden i kraftigere musik.
- Muligheder for at skræddersy musikoplevelsen i Pro Fit

Tilpasning og evaluering af musikprogrammet er subjektiv. Lav justeringer baseret på brugerens feedback angående musikkens lyd kvalitet. Det anbefales at teste med musik på brugerens foretrukne lydniveau under justering, for de bedste resultater. Vælg "Media Player" i menulinjen under *værktøjer*, og vælg musik i drop-down menuen. Vælg derefter et stykke musik, eller afprøv med brugerens egen medieafspiller.

1 Start Pro Fit og forbind høreapparaterne.

Se QuickTip for tilpasningsprotokol for yderligere information.


2 Vælg **QuickFit** fra menuen ☰

Musikprogram

1 Vælg program 2,3 eller 4, tryk på pilen for at se valgmulighederne, og vælg så Musik på det ønskede program.

2 Vælg EQ-kontroller i QuickFit for at justere musikprogrammet til brugerens foretrukne lyd. Justeringsmuligheder som følger [figur 1]

- Alle Hz
- Bas
- Mellem
- Diskant

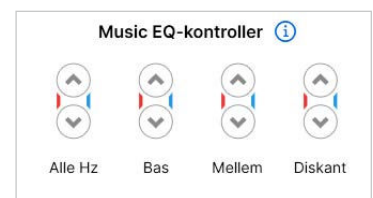

Figur 1

3 Vælg Finjustering for at foretage mere input- og frekvensspecifikke justeringer

4 Se kraftig og svag EQ i grafikken for at observere musikprogrammets indstillinger [figur 2]

5 Vælg + bas, mellem eller diskant for at udvide kanalens frekvensområde.

6 Vælg hvilke kanaler der skal justeres, og brug op- og nedpile til at foretage de ønskede ændringer.



Figur 2

*Available on all wireless and select non-wireless hearing aids. Contact your rep for specific information.