

QUICKTIP

Patienterfaringsniveau

Patienterfaringsniveau er et værktøj til at lette tilvænnning til forstærkning gennem implementering af forstærkningsforskydninger fra det foreskrevne target. Dette værktøj kan være nyttigt for patienter, der er nye til forstærkning eller skifter til Starkey-høreapparater.

Tilgængeligt i: Alle modeller og teknikkiveauer

Forstærkningsindstillingerne kan sænkes fra target for at lette den indledende komfort og tilvænnning til forstærkning, og derefter øges manuelt, eller den automatiske funktion kan aktiveres for gradvist at øge forstærkningsindstillingerne over en bestemt periode.

Mulighederne omfatter: [Figur 2]

Experience Manager er den første tilgængelige skærm i forberedelsessessionen i Pro Fit. Forstærkningsindstillinger kan tilpasses baseret på tidligere erfaringer med forstærkning. Patienterfaringsniveau kan justeres manuelt eller automatisk.

1 Åbn Pro Fit og forbind høreapparater.

Se QuickTip for tilpasningsprotokol for yderligere information.


Patienterfaringsniveau

For at justere manuelt, vælg "patienterfaringsniveau" fra forberedelsessessionen eller flyout-menuen.




[Figur 1] Mulighederne omfatter [figur 2]

- Level 1: Nybegynder
- Level 2: Fortrolig
- Level 3: Erfaren (target)
- Level 4: Powerfit (+10% gain over target)

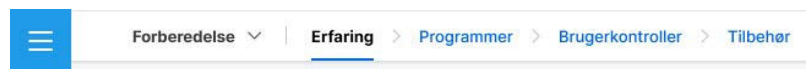


Figur 1

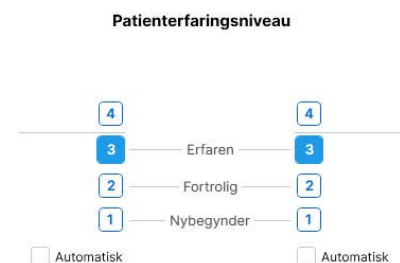

Figur 2

Automatisk Patienterfaringsniveau

- 1 Vælg patienterfaringsniveau i forberedelsessessionen eller flyout-menuen. 
- 2 Marker feltet "automatisk" for at aktivere automatisk patienterfaringsniveau. [Figur 3]

Aktivering af automatisk patienterfaringsniveau vil blive bekræftet via visuelle indikatorer: [Fig. 4]



Figur 3

- Ikon i øverste venstre hjørne af frekvensrespons-grafen
- De stiplede targetkurver viser det endelige forstærkningsmål
- Resterende dage

- 3 Vælg ønsket startniveau:
1: Nybegynder eller **2: Fortrolig**

- 4 Vælg **samlet varighed** fra dropdown-menuen. Mulighederne er: 2 uger, 1 måned (default), 2 måneder, 3 måneder, 4 måneder, 5 måneder, eller 6 måneder.

- 5 Brugerens fremskridt kan følges under patienterfaringsniveau eller i tilpasningsoversigten. [Figur 5]

Pro Fit registrerer følgende information:


- Resterende dages (baseret på 10-timers brugsmønster)
- Skraveret område og pil, der viser fremskridt

- 6 Så snart den automatiske tilvænning er igangsat, kommer der to nye valgmuligheder: [Figur 6]

Pause: Stopper processen midlertidigt. Vælg **Genoptag** for at genoptage processen.

Reset: Stopper processen og nulstiller patienterfaringsindstillingen.

NOTE: Pro Fit sporer et om et sæt apparater gør fremskridt i forskellig hastighed. Hvis dette er tilfældet, kommer der i Pro Fit en mulighed for at synkronisere højre og venstre fremskridt.

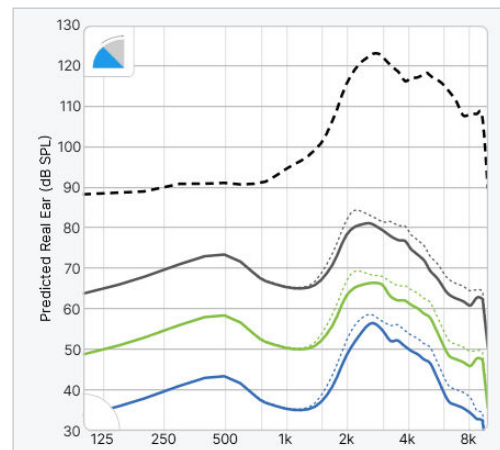

Figur 4

Status	
Feedback-måling	Ikke udført
Auto Erfaringsmanager	Setup
Motion-based Optimization	On
Power-On Delay	Kort
Automatisk tænd/sluk	On
Selvtest	Deaktiveret

Figur 5



Figur 6

- 7 **Komplet** Patienterfaringsniveau vil skrive, når processen er færdiggjort. Alle indikatorer på skærmen vil vise at den gradvise tilvænning er gennemgået. Resterende dage vil nu også stå på 0.